

W60020AM


ホスケアトイレ抗菌 (プレミアムタイプ)

吸収量：約600ml 1箱：20枚入 / 1カートン：18箱入
袋：65×38 cm / 箱：20×11.5×11.5 cm / カートン：42×37.5×36.5 cm
袋：ポリエチレン (抗菌加工) / パッド：高吸収性ポリマー、セルロース



吸収量
約600mlの
吸収パッド付

便器をすっぽりカバー!

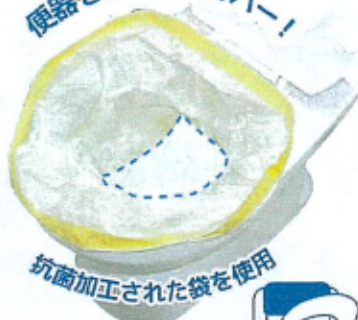

抗菌加工された袋を使用



- コンパクトで備蓄しやすい
- 袋内での菌の増殖を防ぐ
- パッドでかんたん凝固
- ひも付きの袋で簡単処理
- 気になる悪臭を軽減
- 院内感染予防に
- 尿を約600ml吸水&ジェル化
- ポータブルトイレの洗浄不要

ロール状で
箱がコンパクト



ベッドパンや
ポータブルトイレにも



*トイレには流さないでください。

使用方法

<p>1</p> <p>袋を開けて最初の一枚を切り離してください。 中に入っているパッドが尿を吸収し固めます。</p>	<p>2</p> <p>袋を便器もしくは便座にかぶせ、パッドを便器に セットし尿をたしてください。</p>	<p>3</p> <p>使用後は袋を外し、ひもを引っ張って袋を閉じます。 念のため袋自体を縛ることをお勧めします。 廃棄方法は自治体の指示にしたがってください。</p>
---	---	--

第三者機関による試験 実施済

抗菌

袋自体に抗菌加工が
されているので
菌の増殖を抑えます。

**耐熱
耐冷**

耐熱温度110℃
耐冷温度-30℃が
証明されています。

**アンモニア
発生抑制**

尿を吸収し固めることで
尿素などの悪臭の原因と
なる物質 (アンモニア等)
への変化を遅らせます。